

## Die Fußanalyse


Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre eigene Fußanalyse durchzuführen. Dann haben wir die Möglichkeit, die perfekte Einlage zu entwickeln, die Ihrem Fuß entspricht. Sie erhalten dann perfekte Unterstützung für Ihre Füße. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Einlagen einen guten Effekt auf Fersen-, Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenprobleme haben. Denken Sie jedoch daran, dass sich die Einlagen allmählich an den Fuß gewöhnen müssen. Die Wirkung tritt möglicherweise nicht am ersten Tag auf, sondern möglicherweise erst nach einigen Tagen. Es ist individuell von Person zu Person.



1. Kleben Sie 2 A4-Blätter auf den Boden. Füllen Sie eine Wanne mit Wasser, um Ihre Füße zu tränken.



2. Machen Sie Ihre Füße nass und legen Sie die nassen Füße auf die A4-Blätter

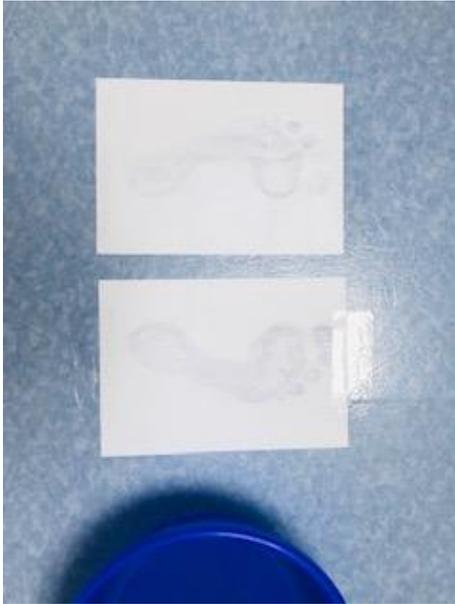

3. Nehmen Sie die Blätter ab und die Drucke sind fertig



4. Füllen Sie die Konturen der Drucke mit einem Bleistift / Smoking aus, um die Drucke besser zu sehen. Senden Sie die Abzüge per E-Mail an [info@gg-reitsport.de](mailto:info@gg-reitsport.de) und wir werden direkt zurücksenden, welche Einlage die beste für Sie ist. Sie können dann die richtige Einlage in unserem Webshop bestellen.

Alternativ können Sie natürlich auch in unseren Räumlichkeiten in 48493 Wettringen eine Fußanalyse durchführen lassen. Nutzen Sie hierfür bitte unser Kontaktformular.

**FUßANALYSE**

**ANLEITUNG**

1. Stehen Sie 10 Sekunden auf der Platte
2. Vergleichen Sie Ihren Fußabdruck mit den drei verschiedenen Fußgewölben, niedrig, mittelhoch und hoch
3. Stellen Sie fest, welche dieser drei Alternativen am besten mit Ihrem Abdruck übereinstimmt
4. Wählen Sie Ihre perfekte Einlage

**Niedriges Fußgewölbe**

**Mittelhohes Fußgewölbe**

**Hohes Fußgewölbe**

Skohälsan

© Gisela Gesk 2020 – [www.hufschuhe-onlineshop.de](http://www.hufschuhe-onlineshop.de)