

Im Einsatz am Kundenpferd

myFREEDM Sohlen und ihre Eigenschaften auf einen Blick:

- Leicht wie Luft
- Sehr elastisch
- Weich und doch formstabil (Memory-Effekt)
- Hoch stoßdämpfend
- Mit spürbarer Energierückgabe
- Langlebig und extrem belastbar
- Pflegeleicht und robust
- Ganzjährig einsetzbar

Die Unterschiede bei den Modellen:

Therapie:

Ca. 1 cm Ausgangsdicke

Weich-elastisch, dadurch ein sehr softes, federndes Laufgefühl

Besonders geeignet für sehr empfindliche, schmerzfühlige Pferde bei der täglichen Arbeit und bei Pferden mit Problemen / Erkrankungen im Bereich der Hufe und Gelenke

Oft die erste Wahl bei Hufrehe im Schub und bei der Rekonvaleszenz. Beste Stoßdämpfung und daher wertvolle Unterstützung bei Gelenkerkrankungen

Sport:

Ca. 1,2 cm Ausgangsdicke

Fest-elastisch, dadurch mehr Energierückgabe

Besonders geeignet für Pferde im sportlichen Training, bei muskulären Defiziten und Problemen im Sehnen- und Bänderbereich

Sehr gut geeignet als Strahlunterstützung bei Hufbeinrotation und Hufbeinsenkung oder als Trachtenunterstützung bei zu flacher Stellung und daraus resultierenden Problemen

Freizeit:

Ca. 0,5 cm Ausgangsdicke

Fest und leicht elastisch, formstabil

Besonders geeignet zur Vorbeugung von Problemen im Bereich der Hufe und Gelenke durch harte Untergründe sowie bei Schmerzfühligeit beim Laufen über steinigen Boden

Zur problemlosen Umstellung von Eisenbeschlag auf Barhufe in fast allen Hufschuhmodellen bestens einsetzbar

Der Einsatz am Kundenpferd ist denkbar einfach und sehr effektiv:

- **Vorgehensweise bei vorhandenen Hufschuhen:** Einfach die passenden Sohlen einlegen und die Hufschuhe wie gewohnt anziehen. Anfangs kann es gelegentlich etwas eng wirken, das gibt sich aber im Laufe der Tragezeit.
- **Vorgehensweise bei Akutfällen mit schmerzenden Hufen:** Eine Sohle unter einen Huf platzieren und so eine dämpfende Unterlage schaffen. Die andere Sohle mit starken Tapestreifen vorbereiten und rasch an den kurz aufgehobenen Huf befestigen. Dann die zweite Sohle ebenfalls mit Tape befestigen. Anschließend einen Hufverband anlegen oder einen Krankenschuh nutzen.
- **Memory Effekt wirken lassen:** Wenn die myFREEDM Sohlen im Verlaufe der Tragezeit durch Hufe und Pferdegewicht zusammengedrückt werden, benötigen sie ein paar Tage Pause für die Rückformung. Sollen aus therapeutischen Gründen die Sohlen dauerhaft getragen werden, empfiehlt es sich, 2 Paar im Wechsel zu nutzen.

